



렌즈 교체방법

Cubezero

CONTACT LENS CLEANER



사용법

큐브제로 사용자 가이드



품 명 큐브제로
종 류 콘택트렌즈 멸균기
주 소 대전광역시 서구 배재로78 계룡 202호
고객센터 전국) 1522-0970

제 조 사 주식회사 티피에스
제 조 국 대한민국
홈페이지 cubezero.co.kr

제품 구성



i 특수 쿼츠 유리는 본체 세척 용기에 삽입 되어 있으며 3개월에 한번 교체 알림 가동시 쿼츠를 빼내어 교체용 세척용기에 삽입하여 사용하시면 됩니다.(교체방법 6p 참조)

사용 방법

본 제품은 콘택트렌즈 멸균과 세척을 동시에 진행합니다. 가동 시 외부로 미세하게 진동이 흘러 나올 수 있고 미세한 소음도 발생 합니다.



- 1 세척용기에 용액을 넣으시고 콘택트렌즈를 R/L에 맞추어 양쪽에 넣으시고 뚜껑을 닫아 주세요.
⚠ 용액을 넣을 때에는 반드시 용기를 본체에서 뺀 상태에서 해야합니다. 용기 장착부 하단에 액체가 들어가면 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 2 멸균기 중앙의 3D 진동판에 세척용기 하부 틈새에 맞추어 밑으로 누르시고 오른쪽으로 돌려 끼우세요
- 3 덮개를 닫고 스타트 버튼을 한 번 클릭하면 녹색불이 들어 오면서 3분 가량 가동 됩니다. (가동시 덮개를 열으면 안전 장치가 작동되어 자동 중지가 되므로 열지 마세요)



- i** 장착할 때 진동판이 흔들리는 것은 제품 하자가 아닙니다. (진동이 외부로 흘러나가는 것을 막아서 독자적으로 3D입체진동을 일으키는 원리 입니다.)
- i** 제품 개봉 사용은 내장 배터리가 방전 상태이므로 케이블을 연결하여 사용하세요.
- i** 첫 가동 시 단백질 제거모드로 가동하여 주십시오

사용 가능한 콘택트렌즈 종류

하드렌즈, RGP렌즈, 드림렌즈, 소프트렌즈 (1일, 3일, 1주, 2주, 1달, 3달, 6달용)

렌즈 보관 방법

별도의 보관용기가 필요 없으며 세척용기에 그대로 보관하여 사용하기 바랍니다.

상태 표시등



● 멸균 가동

● 단백질 제거 가동

● 내장 배터리 완충 알림

● 점등 (세척용기 교체 알림)

● 점등 (배터리 부족)

i 완충 상태에서 7일 이상 사용이 가능하고 배터리가 부족할 시 빨간불이 깜박입니다.

i 빨간불이 점등 된 이후 한번 사용은 가능하지만 두 번째 사용은 멸균이 되지 않고 세척만 될 수도 있습니다.

i 큐브제로는 콘택트렌즈 멸균기는 내부의 모든 부속품도 함께 멸균합니다.

단백질 제거 가동 방법


콘택트렌즈 멸균기 스타트 버튼을 두번 연속 클릭하거나 가동중에 한번 더 스타트 버튼을 클릭하여 주시면 녹색등이 보라색으로 바뀌고 단백질 제거 모드로 가동 됩니다.(가동시간은 7~8분 가량 가동이 됩니다.)

- i** 단백질 제거 기능은 1주일에 한번씩 꼭 사용하세요.
- i** 콘택트렌즈에 단백질이 많이 축적되면 용액위에 뜨는 현상이 발생되고 가동 후 단백질 분해 물질이 보일 수 있습니다. (단백질 제거 모드 지속 사용 권장)
- i** 단백질 제거모드 가동 시 멸균 모드도 동시에 작동 합니다.
- i** 단백질 제거 모드는 매일 사용하시면 더욱 좋습니다.(하드렌즈 제외)

사용 용액 및 용량




- i** 다목적 용액, 보존액, 식염수 등 모든 용액이사용 가능합니다.
- i** 한번 사용한 용액의 재사용은 권장하지 않습니다. (멸균 된 세균 잔여물로 이물감이 발생할 수 있습니다)

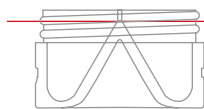

용액은 여기까지 채워서 사용해주세요.
(상단 좌우 렌즈의 격벽이 아래쪽 사선이 되기 직전 경계)

세척 용기 및 특수 퀴츠 유리 교체 방법

3달 사용시 주황색 점등 알림이 작동합니다. 3초간 스타트 버튼을 누르시면 알림이 해지 됩니다. 특수 퀴츠 유리를 빼서서 퀴츠 돌레 실리콘을 제거 하시고 새 용기에 삽입되어 있는 실리콘으로 교체하여 사용해 주세요.

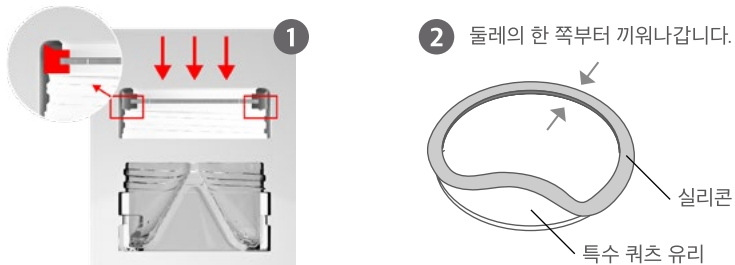

- 1 콘택트렌즈 세척 용기 뚜껑을 열어 손으로 잡고 위쪽에서 아래쪽으로 손가락을 밀어 특수 퀴츠 유리를 꺼내주세요.
- 2 그림과 같이 뚜껑을 돌려가며 특수 커츠 돌레의 실리콘을 눌러 끼워 주세요.
- 3 꺼낸 특수 퀴츠 유리를 교체할 세척용기에 반대로 다시 끼워주세요.
 - 1의 방식을 거꾸로 하시면 됩니다.

i 특수 퀴츠는 언제나 지문 없이 깔끔한 상태를 유지 하셔야 멸균 효력을 100% 발휘 할 수 있습니다.

i 세균이나 바이러스 찌꺼기가 축적되어 3달에 한번 교체는 필수. [미국안과학회]

주의 사항

- !** 콘택트렌즈의 수명을 연장시키는 제품이 아니므로 정해진 사용기간에 맞추어 콘택트렌즈를 교체하여 주시고 부득이하게 사용할 경우 일주일 이상 사용하지 않습니다.
- !** 모든 콘택트렌즈는 사용기간에 맞추어 교체하시는 것이 좋습니다.
- !** 원데이 렌즈의 경우 3회 이상 사용을 하시면 안됩니다. (원데이의 특성 상 내구성이 약하여 변형되거나 찢어 질 수 있습니다.)
- !** 가동시 제품을 오픈 하시면 자동으로 가동이 중단 됩니다.
- !** UV-C 단파장이 피부에 직접 노출되면 피부암 및 각종 질병이 발생할 수 있으므로 절대 인위적으로 제품을 분해하시면 안됩니다.(제품 분해 시 A/S 불가함)

참고 사항


- i** 제품 가동 후 열었을 때 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 제품의 덮개를 열어두면 냄새는 금방 사라집니다. UV-C 단파장은 보통 300시간 이상 사용시 플라스틱 경화를 일으킵니다. 큐브제로 사용 시간이 평균 1달에 120분(2시간)입니다. 따라서 이 현상은 최소 6년 최대 12년 후에 일어날 수 있습니다.

구매 가능한 액세서리

교체용 세척용기, 특수 퀴츠 유리, 집게, 렌즈 흡입봉, 렌즈착용키트
제품 구입처에서 구매가 가능합니다.

보증서

제품명	
구입일	
구입처	

 세척 용기에 안에 용액을 넣으신 상태로 본체를 가지고 다니시면 침수 고장의 원인이 됩니다.(A/S 불가)

 CUBE ZERO 무상보증기간은 12개월입니다.

무상 서비스

소비자 피해 유형	보상내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 1주일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 리퍼	해당없음
고객인도 전 운송과정에서 발생한 고장	제품교환	
외관 손상 없이 구동이 되지 않을 때	무상 리퍼 서비스	유상리퍼 서비스

유상 서비스

제품 고장이 아닌 경우	사용설명서 미숙지로 인한 서비스 접수 시
	소비자의 고의 또는 과실로 제품의 부품 및 본체를 훼손한 경우
소비자 과실로 고장난 경우	제품에 붙어 있는 스티커 라벨이 손상과 보증기간이 지난 경우
	외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상시
	임의로 분해 등 사용자의 부주의로 손상된 경우
그 밖의 경우	천재지변 (낙뢰, 화재, 염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
	정식유통과정을 거치지 않고 구입한 경우

- 고장이 아닌데 서비스를 요청한 경우 왕복 운송비 등의 요금을 청구 할 수 있습니다.
- 운반도중 분실, 훼손, 지연 등의 분쟁처리는 배송회사의 약관을 따르고, 운반사고는 판매업체는 책임지지 않습니다.

주식회사 티피에스

이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관해 주십시오.

A/S 문의 :

전국 1522-0970
cubezero.co.kr